

クーデックエイミーPCA データベース管理用アプリケーション

エイミーズ DB マネージャ インストールガイド(ダウンロード版)

※このインストールガイドでは、Windows10 搭載 PC を例に説明しています。OS バージョンの違い、又は環境設定の違いにより、表示や操作方法等が記載と異なる場合があります。詳細に関しては、ご利用機器の取扱説明書をご確認ください。

(1) ダウンロードページにコムタッチ製造番号とパスワードを入力し、エイミーズ DB マネージャのソフトウェアマスタ(V*. *. *_CAA_D100Setup. zip)をダウンロードします。

Home > エイミーズDBマネージャ CAA-D100 Version 1.0.1	
エイミーズDBマネージャ CAA-D100 Version 1.0.1	
	本品はエイミーズウィンドウと連携し 動作するWindows用のアプリケーショ ンです。 本品を使用して、コントローラで取得 した動作履歴の確認、コントローラが 参照するマスタデータベースの作成を 行うことができます。 インストール方法は <u>こちら</u> をご確認く ださい。
	コムタッチ製造番号: C20103000001A パスワード: タウンロード

コムタッチ製造番号とパスワードは、コムタッチの 裏面に記載があります。



(2) [V*. *. *_CAA_D100Setup. zip]を任意のフォルダに解凍します。

(3) 解凍したフォルダ以下に作成される[V*.*.*_ setup. exe]をダブルクリックします。
 ※. NETFramework 4.6.1のインストールを求められる場合があります。ライセンス条項を確認のうえ同意し、画面のガイドに従ってインストールを実行してください。インストールの際に変更の許可、又は再起動を求められる場合があります。



(4) [次へ]をクリックします。

⊮ Amy's DB Manager	_		×
Amy's DB Manager セットアップ ウィザードへよ	うこそ		
インストーラーは Amy's DB Manager をインストールするために必要	要な手順を	示します	0
この製品は、著作権に関する法律および国際条約により保護されて または一部を無断で複製したり、無断で複製物を頒布すると、著作権 注意ください。	います。こ 種の侵害と	の製品の なります()全部 のでご
< 戻る(B) 次へ((N) >	キャン	セル

(5) [次へ]をクリックします。

※必要に応じてフォルダを変更してください。

※デフォルト設定ではログインユーザの環境のみにインストールされます。PC内の全ユーザで使用できるようにするには[すべてのユーザー]を選択してください。

· · ·			
録 Amy's DB Manager	_		×
インストール フォルダーの選択			
インストーラーは次のフォルダーへ Amy's DB Manager をインストールし	ます。		
このフォルダーにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別ル トールするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。	カフォノ	レダーに	インス
フォルダー(E):			
C:¥COOPDECH¥AmyPCA¥CAA_D100¥		参照(R))
	ディ	スク領域	载(D)
Amy's DB Manager を現在のユーザー用か、またはすべてのユーザー用にイ	ンスト・	ールします	t:
○すべてのユーザー(E)			
●このユーザーのみ(М)			
< 戻る(B) 次へ(N) >		キャン	セル

(6)[次へ]をクリックします。

🕼 Amy's DB Manager	_		×
インストールの確認			
Amy's DB Manager をインストールする準備ができました。			
[次へ]をクリックしてインストールを開始してください。			
< 戻る(B) 次へ(N)	>	++〕	ノセル

(7) ソフトウェア利用許諾契約を確認しご理解いただいた上で[同意する]を選択し、[次へ]をクリックします。

※[次へ]をクリックするとインストールが開始します。

※インストールには数分程度時間がかかる場合があります。完了するまでしばらくお待ちください。

뤦 Amy's DB Manager	_		×
ライセンス条項			
ライセンス条項をお読みください。以下の条件に同意される場合は[同意 ら[次へ]をクリックしてください。その他の場合は[キャンセル]をクリック	まする]? 心でくた	をクリックし ごさい。	してか
ソフトウェア利用許諾契約			^
大研医器株式会社(以下、「当社」)は、以下の条件 BマネージャCAA-D100(以下、「本ソフトウェア」)の ます。	でエイ の使用	ミーズ を許諾	0 U
第1条(著作権) 本ソフトウェアに関する著作権等 は、当社に帰属し又は第三者から正当なライセンスを り、本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作	Fの知(导たも 霍法な	的財産権 のであ らびに	Ē 関 →
○同意しない(D) ●同意する(A)			
< 戻る(B) 次へ(N)	>	キャン	セル

(8) [閉じる]をクリックします。



以上でインストールは終了です。