

クーデックエイミーPCA スマートフォン用アプリケーション

エイミーPCA 拡張アプリケーション インストールガイド(ダウンロード版)

※このインストールガイドでは、推奨携帯端末である SH-M15 と Windows10 搭載 PC の組み合わせを例に説明しています。携帯端末、OS バージョンの違い、又は環境設定の違いにより、表示や操作方法等が記載と異なる場合があります。詳細に関しては、ご利用機器の取扱説明書をご確認ください。

- (1) ダウンロードページにコムタッチ製造番号とパスワードを入力し、エイミーPCA 拡張アプリケーションのソフトウェアマスタ(V*. *. *_CaaE100st. apk)をダウンロードします。

本アプリケーションは携帯端末（スマートフォン等）にインストールして使用するAndroid専用アプリケーションです。
エイミーPCA用の専用アプリであるエイミーズウィンドウと連携して動作します。
本アプリケーションを使用することにより、指定したファイルサーバ上に操作履歴を自動的に保存することができます。

インストール方法は[こちら](#)を確認してください。

コムタッチ製造番号：

パスワード：


ダウンロード

コムタッチ製造番号とパスワードは、コムタッチの裏面に記載があります。



- (2) 携帯端末と PC を USB ケーブルで接続します。

コムタッチ同梱の USB ケーブルをご使用ください。

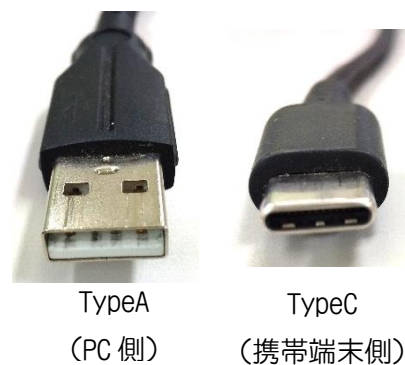

(3) 携帯端末の画面で[ファイル転送]をタップします。



※ご利用の携帯端末によっては、「USB の設定」画面が表示されない場合があります。
通知をタップすることで、表示される場合があります。
詳細はご利用の携帯端末の取扱説明書をご確認ください。

①スワイプして通知を表示




②通知をタップ



③通知をタップ

(4) PCを使用して、以下の操作を行います。

ダウンロードした[V*. *. *_ CaaE100st.apk]を携帯端末の「内部共有ストレージ」にコピーします。

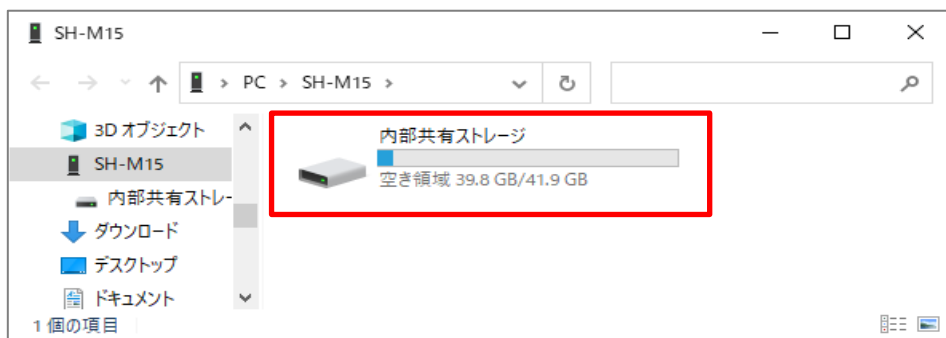


(5) 携帯端末を使用して、以下の操作を行います。

- ① [設定アプリ]をタップし、起動します。
- ② [ストレージ]→[ファイル]とタップします。
- ③ [V*. *. *_ CaaE100st.apk]をタップします。
- ④ ダイアログが表示されたら、[次へ]をタップします。


※携帯端末によっては、④-2に示すダイアログが表示される場合があります。本ダイアログが表示された場合、[設定]をタップし、[提供元不明アプリのインストールを許可する]をオンにしてください。その後③の画面へ戻り、インストールを再開してください。

- ⑤ ダイアログが表示されたら、[インストール]をタップします。

※携帯端末によっては、⑤-2に示すダイアログが表示される場合があります。本ダイアログが表示された場合は、[同意する]をタップして次に進むことを推奨します。

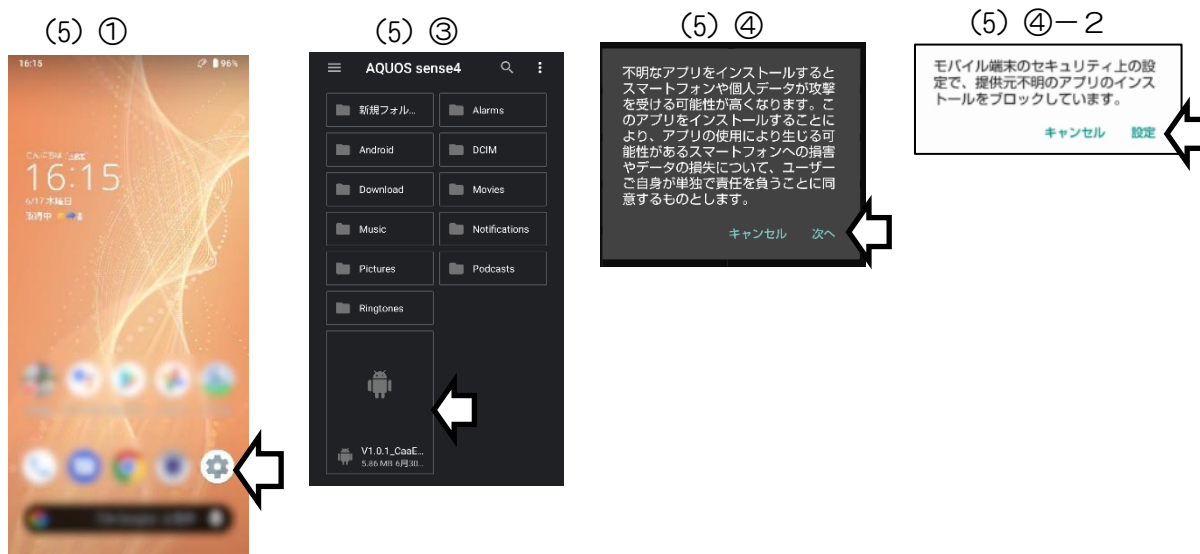

⑥インストールが完了したら、[完了]をタップします。

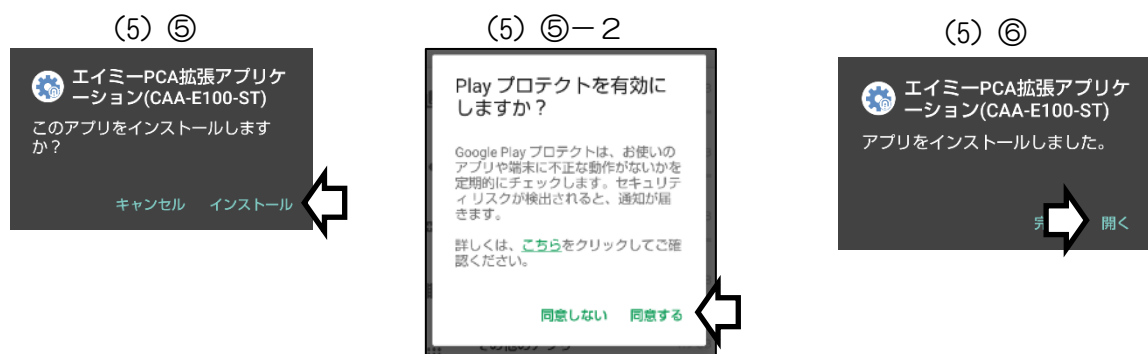

(6) 必要に応じて、ホーム画面にエイミーPCA 拡張アプリケーションのショートカットを作成してください。

※携帯端末によっては、インストール時にエイミーPCA 拡張アプリケーションのアイコンが、ホーム画面に自動で作成されます。

※ショートカットの作成方法については、携帯端末の取扱説明書を確認してください。

(7) エイミーPCA 拡張アプリケーションアイコンをタップします。

※携帯端末のOS のバージョンが新しい場合、(7) - ②に示すダイアログが表示される場合があります。

本ダイアログが表示された場合は、ご利用の携帯端末が利用可能か弊社担当者までお問い合わせください。その際、携帯端末のメーカー、品番及びOSバージョンをお知らせください。

[OK]をタップすると次に進みます。



(8) デバイス内の写真やメディアへのアクセス許可を求めるダイアログが表示されたら、[許可]をタップします。

(9) ソフトウェア利用許諾契約を確認し、ご理解いただいた上で[同意する]をタップします。

以上でインストールは完了です。

エイミーPCA 拡張アプリケーションの詳細な使用方法については、取扱説明書をご確認ください。

※P.3 (5)の④で[提供元不明アプリのインストールを許可する]をオンにした場合、[提供元不明アプリのインストールを許可する]をオフに戻してください。