

クーデックエイミーPCA システム連携用アプリケーション

Amy Viewer インストールガイド(ダウンロード版)

※このインストールガイドでは、Windows10 搭載 PC を例に説明しています。OS バージョンの違い、又は環境設定の違いにより、表示や操作方法等が記載と異なる場合があります。詳細に関しては、ご利用機器の取扱説明書をご確認ください。

- (1) ダウンロードページにコムタッチ製造番号とパスワードを入力し、Amy Viewer のソフトウェアマスタ(V*.*_AmyViewerSetup_Release.zip)をダウンロードします。

Home > AmyViewer CAA-V100 Version 1.0.1
Amy Viewer CAA-V100 Version 1.0.1

通信
操作
接続サーバ
自動で保存
稼働している輸液の履歴
完了した輸液の履歴

Amy Viewer
確認

本品 (Amy Viewer) はPC にインストールして使用する Windows用アプリケーションです。
エイミーPCA用の専用アプリであるエイミーズウィンドウとエイミーPCA拡張アプリケーションと連携して動作します。
Amy拡張アプリによってファイルサーバに保存された動作履歴情報を、本品から確認することができます。
インストール方法は[こちら](#)を確認してください。

コムタッチ製造番号：

パスワード：

ダウンロード

患者ID	輸液番号	デバイスID	輸液日時	流速	残量	残量	残量	残量	残量	残量
1240	23021001	00000004	2/16 09:26	1.0	1.0	0.05	5	機		
4606	23021001	00000076	2/16 09:27	0.5	0.5	0.05	10	機		
0812	23021001	00000220	2/16 14:41	1.0	1.0	0.05	5	機		


コムタッチ製造番号とパスワードは、コムタッチの裏面に記載があります。



(2) [V*.*.*_AmyViewerSetup_Release.zip]を任意のフォルダに解凍します。

(3) 解凍したフォルダ以下に作成される[setup.exe]をダブルクリックします。

※.NET Framework 4.7.2 のインストールを求められる場合があります。ライセンス条項を確認のうえ同意し、画面のガイドに従ってインストールを実行してください。インストールの際に変更の許可、又は再起動を求められる場合があります。

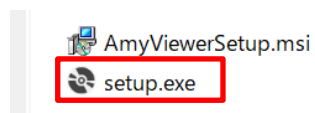

(4) [次へ]をクリックします。




(5) [次へ]をクリックします。

※必要に応じてフォルダを変更してください。

※デフォルト設定ではログインユーザの環境のみにインストールされます。PC 内の全ユーザで使用できるようにするには[すべてのユーザー]を選択してください。




(6) [次へ]をクリックします。

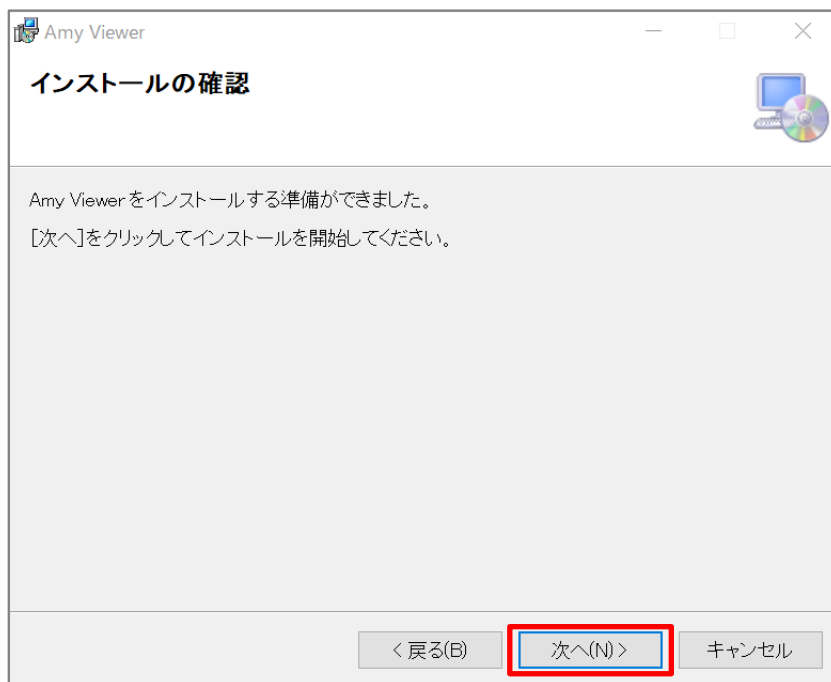


(7) ソフトウェア利用許諾契約を確認しご理解いただいた上で[同意する]を選択し、[次へ]をクリックします。

※[次へ]をクリックするとインストールが開始します。

※インストールには数分程度時間がかかる場合があります。完了するまでしばらくお待ちください。

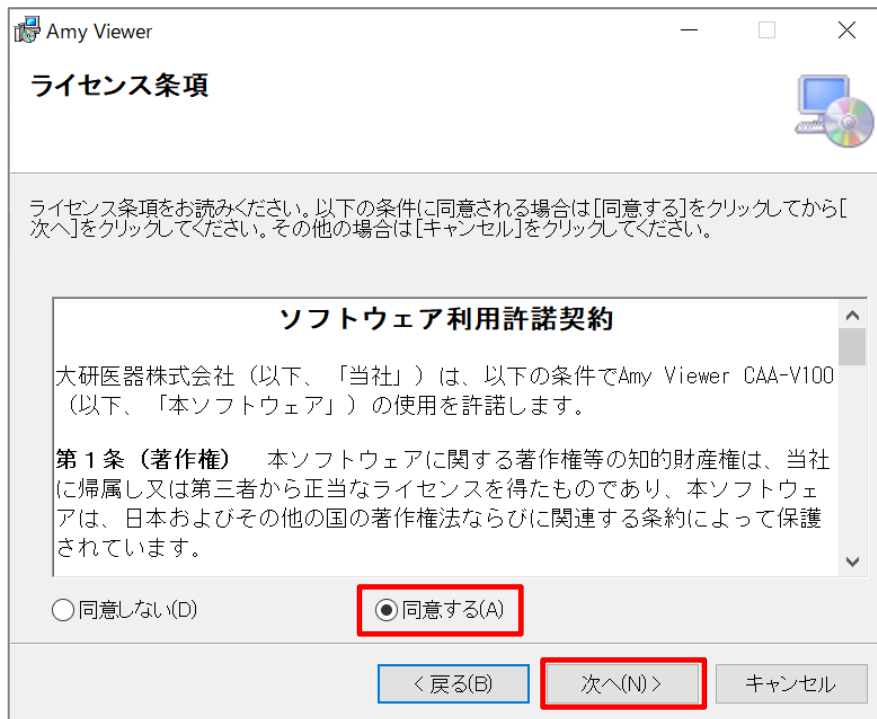

(8) [閉じる]をクリックします。

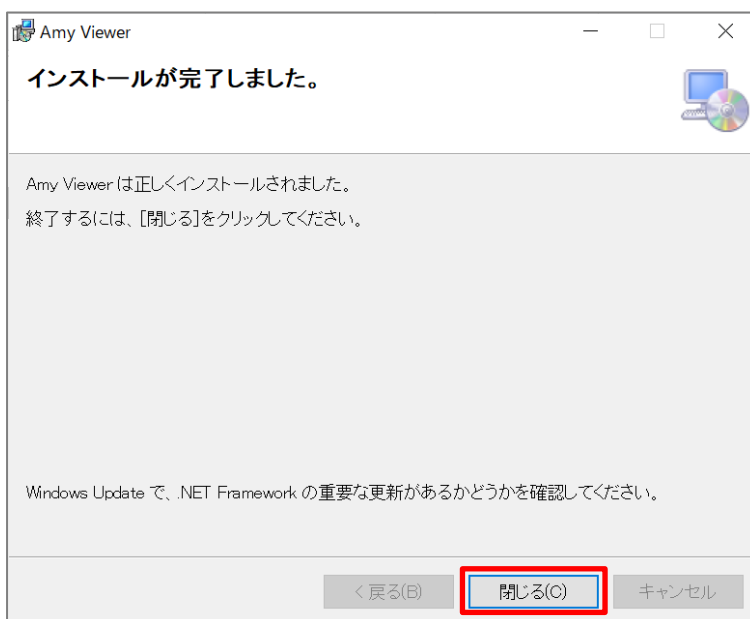

以上でインストールは終了です。